

Ögondusch spray

EyeWash

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

NY

Medi-spray ögondusch för behandling av ögonskada, brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 50ml buffrad Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 3 minuter / spray

Singelhållare
35mm



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

**Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.**

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

EyeWash-spray är lämplig att använda tillsammans med vägghållare. Det innebär att det är enkelt att snabbt ta ned sprayen från hållaren och ta med till den skadade och under transport.

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.

Art nr 8745 Ögondusch 50ml – refill
Art nr 2040 Singelhållare 35mm

AlphraMedic

STERILE R

CE

