

BRÄNNSKADE PRODUKTER



Burncare 3,5 gr gel.

Riv upp påsen och kläm ut innehållet över brännsåret.
Låt det vara ett så tjockt lager som möjligt. Gnid inte ut det.
Vid skada på fingertopp: Stoppa in fingret i påsen och låt vara tills smärtan avtagit. Vid behov, uppsök läkare.

Burncare 50 ml och 120 ml gelspray.

Spraya ut rikligt av innehållet över brännsåret.
Låt det vara ett så tjockt lager som möjligt.
Gnid inte ut gelen.
Täck ev. brännskadeområdet med sårkompress.
Vid behov, uppsök läkare.



Burncare 5x5cm, 10x10cm, 20x20cm, 30x40cm (facemask) och 40x60cm kompress

Riv upp påsen och ta ut kompressen och lägg över brännsåret.
Kläm ut all gel. Se till att kompressen täcker hela brännskadeområdet och 1-2 cm utöver detta. Lägg den tomma påsen över kompressen och fixera med ex. Förstahjälpen-bandage / alt. SuperSoft. Låt kompressen ligga på under 2 timmar.

Vid skada på ex. en hand: Stoppa in handen i påsen och slut öppningen. **Vid brännskada på arm eller ben:** Öppna förpackningen i båda ändar och trä igenom arm eller ben. Slut påsen i båda ändarna. Större/djupare brännskada, uppsök läkare.

Burncare 25 gr gel tub

Kläm ut innehållet över brännsåret. Låt det bli ett så tjockt lager som möjligt. Gnid inte ut det.
Täck ev. brännskadeområdet med sårkompress.
Vid behov, uppsök läkare.

