

# Ögondusch o. Förstahjälpen

## EyeWash-3 + DIN kit 13164

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

**NY**



### EyeWash-3 väska

innehåller 3st ögonduschspray för behandling av bl.a. ögonskada, samt sårvårdsprodukter

Sprayen innehåller 250ml buffrad Natrium-klorid lösning 9mg / liter.

Spoltid - 15minuter / spray



### Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

**Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.**

**Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.**

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic's **EyeWash-3** är en väska som innehåller 3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport.



På arbetsplatsen ska väskan sitta inom "räckhåll" där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

**OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårsvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.**

Väskan innehåller också Din-kit 13164 för behandling av sårskador. Väskan är försedd med dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats och för lätt överskådlighet. Väggfäste är också standard. Tillverkad av slagtålig ABS-plast.

Art nr: 8710  
Art nr 8740

Komplett station Färg: GRÖN  
Ögondusch 250ml - refill

AlphraMedic

